

# Das SEGUFIX<sup>®</sup>-System

- Humane Fixierung mit vielen Variationsmöglichkeiten -

SEGUFIX<sup>®</sup> - der sichere Weg



Katalog 2022



## Das Notwendige human gestalten

### Ein altes Problem

Schon in der Antike war bekannt, dass die Ruhigstellung von Patienten ein wesentlicher Beitrag zur Heilbehandlung sein kann. Die damit verbundene Fixierung an Händen und Füßen konnte jedoch auch heilungsverzögernde Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Wundliegen und Angstzustände. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts änderte sich an diesen Fixierungsmethoden nichts, bis die gleichermaßen einfache und brillante Idee eines besorgten Vaters ein neues Kapitel in der Geschichte der Patientenfixierung eröffnete.

### Die Not eines Kleinkindes

Besagter Vater hatte einen zweijährigen Sohn, der an Lungenentzündung erkrankt war. Als der junge Patient die notwendige Bettruhe nicht akzeptierte, sahen die Ärzte keine andere Möglichkeit, als den Jungen an Händen und Füßen zu fesseln. Völlig verstört und verängstigt verweigerte der Junge daraufhin jegliche Nahrungsaufnahme. Angesichts dieses neuen Problems ordneten die Ärzte Zwangsernährung an. Für die verzweifelten Eltern war diese Situation nicht zu ertragen, und sie nahmen ihren Sohn auf eigene Verantwortung mit nach Hause.

### Liebe macht erfinderisch

In der gewohnten Umgebung ging es dem Jungen zwar schnell besser, aber auch dort wollte er nicht im Bett bleiben. Da hatte der Vater die Idee für einen Haltegurt, der seinen Sohn zwar im Bett fixieren würde, dabei aber viel Raum für Bewegung bot und vor allem Hände und Füße frei ließ. Der Junge akzeptierte den Haltegurt, blieb im Bett und konnte rasch genesen.

### Eine Lösung für viele

Einige Jahre später erfuhr der Vater von den Defiziten der Patientenfixierung in der Medizin. Viele Patienten mussten leiden, weil sie die Bettruhe nicht einhielten oder aus dem Bett fielen – ein Problem, das er schon Jahre zuvor für seinen Sohn gelöst hatte.

Renommiertere Mediziner erkannten den Nutzen für Patienten und Pflegepersonal. Prof. Dr. Dr. h.c. Bürger-Prinz führte die neue Fixierung an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) ein. Das SEGUFIX®-System stieß in Fachkreisen sofort auf große Zustimmung und war wenig später als die international anerkannte Patientenfixierung etabliert.

### So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, bei so wenig Fixierung wie nötig

Medizinische Anforderungen an Fixierungen sind vielseitig, und manchmal ist es erforderlich, auch Gliedmaßen zu fixieren. Um den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde unser Produktangebot in enger Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal stetig erweitert. Bei allen Neuentwicklungen befolgen wir unseren Leitsatz „So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, bei so wenig Fixierung wie nötig“.

### Die humane Fixierung

Das SEGUFIX®-System bietet anspruchsvolle Lagerungs- und Fixierlösungen für Patienten und Pflegepersonal. Diese innovativen Lösungen ermöglichten erstmals zielgerichtete Fixierung und verhindern dadurch die menschenunwürdige Überfixierung vergangener Tage. Aus diesem Grund ist in medizinischen Fachkreisen das SEGUFIX®-System bei seiner Einführung übereinstimmend als „humane Fixierung“ bezeichnet worden. In allen Bereichen der Patientenpflege und auch in schwierigen Pflegesituationen stellt die humane Herangehensweise für alle Betroffenen eine wesentliche Erleichterung dar.

### Beständigkeit in der alltäglichen Pflege

Als Erfinder und Hersteller des SEGUFIX®-Systems freuen wir uns, Ihnen Produkte anzubieten, die Ihnen helfen, Ihre Pflegeaufgaben sicher und verlässlich auszuführen.

Als Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung stehen wir Ihnen auch weiterhin mit Kontinuität, Qualität und Professionalität zuverlässig zur Seite.

Ihre Familie Sánchez-Wysocki

## Produktgruppen

### SEGUFIX®-Verschluss-Systeme – Produktgruppe 1000



### SEGUFIX®-Bandagen-System – Produktgruppe 2000



### SEGUFIX®-Zusatz-Gurte – Produktgruppe 3000



### SEGUFIX®-Akut-System – Produktgruppe 4000



### SEGUFIX®-Mobile-Fixierung – Produktgruppe 5000



### SEGUFIX®-Transport-System – Produktgruppe 6000



### SEGUFIX®-Sitzgurt-System – Produktgruppe 7000



### SEGUFIX®-Zubehör und Schaffelle – Produktgruppe 8000



## Allgemeine Informationen

SEGUFIX®	Seite
Historie: Das Notwendige human gestalten	2
Übersicht Produktgruppen 1000 - 8000	3
Inhaltsverzeichnis	4 - 5
Ampel-System und Kunden-Etiketten	6 - 7
Sicherheits- und Warnhinweise	8 - 9
Qualitätsstandards	10
Pflegeanleitung	11
Produktausführungen / Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen	15
Impressum	48





## SEGUFIX®-Verschluss-Systeme

### Produktgruppe 1000

Artikelnummer	Produktname	Seite
1206, 1216	• SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz / segufix.com	12
1208, 1218	• SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot	12
1209, 1219	• SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot mit Anhänger	12
1306, 1316	• SEGUFIX®-Dreh-Patentschloss grün	13
1308, 1318	• SEGUFIX®-Dreh-Patentschlüssel gelb	13
1406, 1416	• Steckschloss	14
1408, 1418	• Steckschlüssel	14





## SEGUFIX®-Bandagen-System

### Produktgruppe 2000

   	Klett / Sonstige	Produktname	Seite		
2203	2303	2403	–	• SEGUFIX®-Schulterhalterung	20
2204	2304	2404	–	• SEGUFIX®-Handhalterung	21
2205	2305	2405	2705	• SEGUFIX®-Fußhalterung	22 - 23
2211	2311	2411	2711	• SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung	22 - 23
2212	2312	2412	–	• SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung	20
2217	2317	2417	–	• SEGUFIX®-Kopflagerung	24
2221	2321	2421	2721	• SEGUFIX®-Standard / Schrittgurt	16
2222	2322	2422	–	• SEGUFIX®-Komplett / Schrittgurt	17
2224	2324	2424	2724	• SEGUFIX®-Handhalterung verlängert	21, 23, 31
2231	2331	2431	2731	• SEGUFIX®-Standard / Oberschenkelmanschetten	18
2232	2332	2432	–	• SEGUFIX®-Komplett / Oberschenkelmanschetten	19
2250/r	2350/r	2450/r	–	• SEGUFIX®-Kompakt	25



## SEGUFIX®-Zusatz-Gurte

### Produktgruppe 3000

   	Klett / Sonstige	Produktname	Seite		
–	–	–	3110/r	• SEGUFIX®-Beinbügelgurt	27
3240 bis 3244	3340 bis 3344	3440 bis 3444	–  3745	• SEGUFIX®-Verlängerungsgurte	26

## SEGUFIX®-Akut-System

### Produktgruppe 4000



   	Klett / Sonstige	Produktname	Seite		
4212/r	4312/r	4412/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Komplett	29
4213/r	4313/r	4413/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter	28
4214/r	4314/r	4414/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand	28
4215/r	4315/r	4415/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß	29

SEGUFIX®-Mobile-Fixierung				Produktgruppe 5000	
			Klett / Sonstige	Produktname	Seite
5204/r	5304/r	5404/r	–	• SEGUFIX®-Handfixiergürtel	32
5218	5318	5418	5718	• SEGUFIX®-Fixierhilfe	33
5243	5343	5443	–	• SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter	30
5245	5345	5445	–	• SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß	30
–	–	–	5745	• SEGUFIX®-Tragen-Lagerung-Fuß Klett	31
SEGUFIX®-Transport-System				Produktgruppe 6000	
			Klett / Sonstige	Produktname	Seite
6216	6316	6416	6710	• SEGUFIX®-Leibgurt-Transport	34
–	–	–	6720	• SEGUFIX®-Hosenträgergurt	35
–	–	–	6730	• SEGUFIX®-Rückenlehnengurt	35
6240	6340	6440	–	• SEGUFIX®-Rückhaltegurt	36
6244	6344	6444	–	• SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster	36
6256	6356	6456	6750	• SEGUFIX®-Multigurt	37
6266	6366	6466	6760	• SEGUFIX®-Beckengurt	38 - 39
6276	6376	6476	–	• SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt	39
SEGUFIX®-Sitzgurt-System				Produktgruppe 7000	
			Klett / Sonstige	Produktname	Seite
7240	7340	7440	7740	• SEGUFIX®-Sitzgurt	40, 43
7246	7346	7446	–	• SEGUFIX®-Sitzgurt	40
7250	7350	7450	7750	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Schrittgurt	41
7256	7356	7456	–	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Schrittgurt	41
7260	7360	7460	–	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Oberschenkelmanschetten	42
7266	7366	7466	–	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Oberschenkelmanschetten	42
–	–	–	7770	• SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett	44
7280	7380	7480	7780	• SEGUFIX®-Fußhalterung Transport	44
SEGUFIX®-Zubehör / Schaffelle				Produktgruppe 8000	
Artikelnummer			Produktname		Seite
8010			• SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage		45
8011			• SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage		45
8012			• SEGUFIX®-Schaffell-Einlagen für Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten		45
8013			• SEGUFIX®-Schutzbezug		38
8014			• SEGUFIX®-Transport-Tasche		46
8015			• SEGUFIX®-Bereitschaftstasche		46
8016			• SEGUFIX®-Aufrichter		47
8017			• Anti-Rutsch-Auflage		46
8018/D			• SEGUFIX®-Lehrfilm		47
8019/D, 8029/D			• SEGUFIX®-Handbuch		47
8022			• SEGUFIX®-Wäschenetz		27, 47

## Orientierende Produktkennzeichnung

Die farbigen SEGUFIX®-Etiketten bieten Ihnen arbeits-erleichternde Orientierungshilfen und folgende Vorteile:

- Schnelle und zuverlässige Orientierung bei der Zuordnung von SEGUFIX®-Gurten durch auffällige Farbgebung
- Einteilung der Körperbereiche nach Ampel-Farben rot /gelb /grün (siehe Illustration)
- Eindeutige Identifizierung des Gurtes durch Artikelnummer und Produktname (mehrsprachig)
- Schnelle Zuordnung der Größe (XS / S / M / L / XL / XXL) aufgrund auffallender Positionierung
- Textilien-Pflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 3758:2013-12

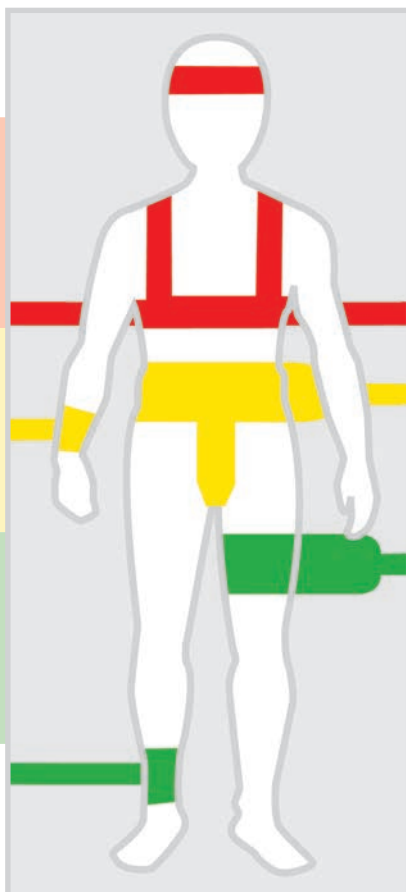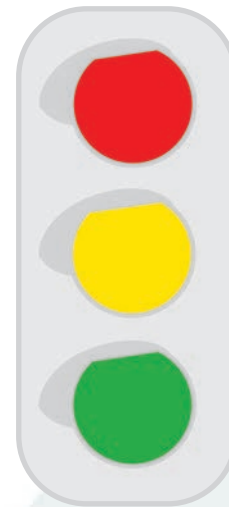

**ROT**  
Schulter und Kopf

**GELB**  
Taille und Hand

**GRÜN**  
Oberschenkel und Fuß

**BLAU**  
Zusatz-Gurte

**WEISS**  
Transportbereich



# SEGUFIX®- Kunden-Etiketten

## Zusatztext nach Ihren Angaben


- Kundenspezifischer Zusatztext (z. B. Angaben von Station/Haus/Patient)
- Schnelle und somit einfache Verteilung nach der Wäsche auf die Stationen bzw. Wohnbereiche
- Wäschetrockner verringern die Haltbarkeit (Lesbarkeit)
- Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer
- **Bestell-Nr. 8020:**  
Bei Neubestellung von Gurten mit Zusatztext
- **Bestell-Nr. 8021:**  
Produkte im Einsatz können nachträglich von der Firma SEGUFIX® mit Etiketten inklusive Zusatztext nachgerüstet werden



## SEGUFIX®-Produkte nach dem Ampel-System

ROT Schulter und Kopf	GELB Taille und Hand	GRÜN Oberschenkel und Fuß
Schulterhalterung	Standard mit Schrittgurt	Oberschenkelhalterung
Schulter-Zusatzhalterung	Standard mit Oberschenkelmanschetten	Fußhalterung
Kopflagerung	Handhalterung	Verbindungsgurt
Akut-Fixierung-Schulter	Akut-Fixierung-Hand	Akut-Fixierung-Fuß
Tragen-Fixierung-Schulter	Kompakt	Tragen-Fixierung-Fuß
	Handfixiergürtel	Beinbügelgurt
	Fixierhilfe	

WEISS Transportbereich	BLAU Zusatz-Gurte
Sitzgurte	Verlängerungsgurte
Rückhaltergurte	
Beckengurte	
Multigurte	
Leibgurte-Transport	
Rückenlehnengurte	
Hosenträgergurte	

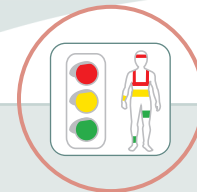

Das SEGUFIX®-Ampel-System begleitet Sie zur besseren Orientierung bei den einzelnen Produkten durch diesen Katalog.

Farbliche Einteilung der Etiketten nach dem Ampel-System in rot/gelb/grün.

Die Produktetiketten sind nach dem Ampel-System den 3 Körperbereichen zugeordnet (siehe Tabelle oben).



Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sind nur gültig für Original-SEGUFIX®-Produkte. Benutzen Sie das SEGUFIX®-System nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisungen gelesen und verstanden haben.

Nur aktuelle Gebrauchsanweisungen verwenden und diese sicher und griffbereit verwahren. Produkt und Gebrauchsanweisung müssen übereinstimmen. Fehlerhafte Anwendung des SEGUFIX®-Systems kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben, auch mit tödlichem Ausgang. Die Sicherheit Ihres Patienten hängt davon ab, dass Sie das SEGUFIX®-System korrekt anwenden.

## SEGUFIX® - Die indikationsgerechte Methode für die Pflege

### 1. Anwendungsvoraussetzungen

Die Einhaltung der Betreiberpflichten, entsprechend den nationalen gesetzlichen Bestimmungen, obliegt der anwendenden Organisation. Beachten Sie immer die Fixierungsvorschriften Ihres Arbeitsplatzes, das hausinterne Fixierungsprotokoll und die aktuelle Gesetzgebung Ihres Bundeslandes. Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.

SEGUFIX®-Produkte dürfen nur von Personen angewendet werden, die dafür die erforderliche Ausbildung oder Kenntnis besitzen. Gesetzliche Bestimmungen und ärztliche Anordnungen sind strikt einzuhalten! Der verordnende Arzt muss sich versichern, dass der Gesundheitszustand des Patienten die Anwendung des SEGUFIX®-Systems zulässt. Auf relevante allergische Disposition achten.

### 2. Verwendungszweck

SEGUFIX®-Produkte dürfen ausschließlich für die bestimmungsgemäßen medizinischen Verwendungszwecke benutzt werden.

### 3. Gefährliche Gegenstände entfernen

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung führen können, oder mit denen der Patient die Gurte beschädigen kann (z. B. Brille, Schmuck, scharfe Gegenstände).

### 4. Überprüfung der Gurtsysteme vor jeder Benutzung



Vor Benutzung muss das Produkt auf schadhafte Nähte, abgerissene Teile und beschädigte Ösen untersucht werden. Schadhafte Produkte können die Funktion beeinträchtigen

und zu Verletzungen führen. Benutzen Sie kein Produkt, das Beschädigungen aufweist.

### 5. Schlösser dürfen beim Öffnen nicht unter Zug stehen

Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit zwischen oberem und unterem Anschlagpunkt des Knopfes sicher gestellt sein (Art. 1206). Deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden (Ausnahme: Produkte mit „r“ oder „f“ in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte. Bei diesen Gurten sind maximal 3 Gurtlagen zu verwenden!). Bei der Verwendung des Dreh-Patentschlusses (Art. 1306) dürfen maximal 4 Gurtlagen verwendet werden. Bei der Verwendung des Steckschlusses (Art. 1406) grundsätzlich nur 3 Gurtlagen verwenden.

### 6. Benutzen Sie die Seitenbefestigungen

Die SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten nicht ohne angebrachte Seitenbefestigungen anwenden. Ohne Seitenbefestigungen kann der Patient mit dem Bauchgurt rotieren oder über den Bettrand rutschen, mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs und möglicher Todesfolge.

Falls Patienten auch bei angebrachten Seitenbefestigungen und hochgestellten Bettgittern über den Bettrand gelangen, müssen in diesen Fällen zusätzliche Fixierungsmaßnahmen erfolgen.

Wichtig: Führen Sie die Seitenbefestigungen – vor dem Festmachen – durch die jeweiligen Schlaufen auf dem breiten Bettgurt (siehe Gebrauchsanweisung).

### 7. Bei Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen ist zu beachten

- SEGUFIX®-Produkte nur mit Betten, standfesten Sitzgelegenheiten bzw. Tragen verwenden, die eine Anbringung gemäß Gebrauchsanweisung erlauben.
- Die Produkte müssen so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen können.
- Befestigungsgurte und Bewegungsmechanismus von Betten, Matratzen, Wechseldruckmatratzen o. ä., Tragen oder Sitzgelegenheiten können sich gegenseitig beeinträchtigen, mit der Folge von Beschädigungen, Funktionsbeeinträchtigungen und Verletzungsgefahr.
- Die ausgewählten Haltepunkte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.
- SEGUFIX®-Produkte verhindern nicht das Umkippen oder Wegrollen von Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen.


Hilfreich in diesem Zusammenhang:

Normen für Betten: DIN EN 60601-2-52

Normen für Rollstühle: DIN EN 12182 und

DIN EN 12183

### 8. Bettgitter müssen hochgestellt sein

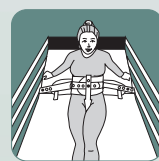

Um Unfälle bei der Fixierung zu vermeiden, sind die Bettgitter hochzustellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung).

Achtung: Bei geteilten Bettgittern ist ein „Gap protector“ (Einsteckscheiben), der ein Hindurchrutschen des Patienten verhindert, zu verwenden. Bei geteilten Bettgittern kann es sonst vorkommen, dass der Patient trotz angelegter Fixierung durch die vorhandene Öffnung hindurchrutscht – mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs.



## 9. Patienten in Fixierung überwachen



Patienten in Fixierung erfordern regelmäßige Überwachung. Aggressive, aufgebrachte und unruhige Patienten oder solche, bei denen die Gefahr der Aspiration besteht, erfordern eine ununterbrochene Überwachung.

## 10. Überprüfung der Verschluss-Systeme vor jeder Benutzung



SEGUFIX®-Magnetschlösser schwarz / segufix.com, SEGUFIX®-Dreh-Patentschlösser grün, Steckschlösser, Schnapp-, Klett- und Metallschlaufenverschlüsse auf

Funktion und sicheren Halt prüfen. Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen! Dies kann zu Fehlfunktion führen. Sind beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel zu öffnen, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden. Den Sockelkopf auf Verschleiß (Abrundung / Stauchung) überprüfen.

## 11. Warnhinweis Herzschrittmacher



Bei Patienten mit Herzschrittmacher muss ein Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen Herzschrittmacher und magnetischen Schlössern/ Schlüsseln eingehalten werden, da sonst die Funktion beeinträchtigt

werden kann und z. B. bei dem Patienten Tachykardien ausgelöst werden könnten (alternativ: Steckschloss verwenden). Bezüglich möglicher Beeinträchtigung anderer Patienten-Implantate durch starke Magnete bitte die jeweiligen Herstellerangaben beachten.

## 12. Befestigung der Gurte überprüfen

Die korrekte Befestigung der Gurte regelmäßig überprüfen. Die Gurte müssen straff am beweglichen Kopf- oder Fußteil angebracht werden, ohne bewegliches Kopf- oder Fußteil Bettrahmenbefestigung. Die Gurte dürfen nicht verrutschen.

## 13. Nur Original SEGUFIX®-Produkte benutzen

Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen SEGUFIX®-Produkte nicht verändert oder mit Fremdprodukten kombiniert werden. Bei Nichtbeachtung erlöschen Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

## 14. Benutzung des SEGUFIX®-Systems in Fahrzeugen



In Automobilen ersetzen SEGUFIX®-Transportgurte nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt- / Beckengurt). Transportgurte dürfen nur als zusätzliche

Stützung oder Fixierung des Patienten angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient im Notfall schnell gerettet werden kann (gut sichtbar angebrachte und griffbereite Gurtschneider).

## 15. Nicht zu eng, jedoch sicher

Die Fixierung muss eng anliegen, darf aber die Atmung und Blutzirkulation nicht behindern. Zu locker angelegte Produkte können die Sicherheit des Patienten gefährden. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.

## 16. Lagerung

Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, Gurte und Verschluss-Systeme trocken und dunkel bei einem Normklima von 20 °C lagern.

## 17. Brenneigenschaft des SEGUFIX®-Bettsystems



Nach DIN EN 71-2 Abschnitt 4.3 nicht entflammbar.

Nach DIN 75200 Brenngeschwindigkeit null.

Selbstverständlich dürfen die

Produkte nicht mit glühenden Zigaretten in Kontakt kommen oder offenen Flammen ausgesetzt werden, da dies zu nachhaltigen Beschädigungen und Gesundheitsschäden führen kann.

## 18. Immer die richtige Größe wählen

Wählen Sie immer die richtige Größe gemäß der Körper- und Taillenmaße (siehe Größentabellen). Zu große bzw. zu kleine Produkte beeinträchtigen Komfort und Sicherheit des Patienten.

## 19. Entsorgung

Kartonagen → Altpapier  
Umverpackungen (Folie) → Gelber Sack  
Unbrauchbare Produkte → Restmüll

## 20. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: [https://www.segufix.com/conformity\\_de.php](https://www.segufix.com/conformity_de.php)

## 21. Gutachterliche Empfehlung zur Unfallvermeidung

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, TU-Berlin):

1. Seitenbefestigungen anlegen
2. Durchgehende Bettgitter hochstellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung)
3. Es kann notwendig sein, weitere Fixierelemente einzusetzen, um ein Entkommen aus dem Bett sicher zu verhindern.

## 22. Wichtig vor jeder Anwendung

- Sicht- und Schließkontrolle der Schlösser
- Sichtkontrolle: Gurte, Ösen, Stoffschlaufen, Klett-, Schnapp- und Metallschlaufenverschlüsse etc.
- Nur bei ausreichender Indikation anwenden
- Gesetzliche Voraussetzungen prüfen

## 23. Schwerwiegende Vorfälle

Schwerwiegende Vorfälle sind der zuständigen Behörde und dem Hersteller zu melden.

- **SEGUFIX®-Qualität hat sich bewährt**

Das Markenzeichen SEGUFIX® bürgt seit über 50 Jahren für gleichbleibende Qualität der Produkte, hergestellt mit ausgewählten und hochwertigen Rohstoffen, einer soliden Verarbeitung und ausgefeilter Funktionalität. Ständige Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Sicherheitsstandard.

- **Produktions-Standort Deutschland**

Seit Bestehen der Firma produziert das von den Inhabern geführte Familienunternehmen das SEGUFIX®-System in der Bundesrepublik Deutschland.

- **MDR (Medical Device Regulation)**

Das SEGUFIX®-System (Medizinprodukt: Klasse I) erfüllt alle Sicherheits- und Leistungsanforderungen der 'Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte' (ersetzt das MPG).

- **Gebrauchsanweisungen – Sicherheitshinweise – Produktkennzeichnung**

Die detaillierten und bebilderten Gebrauchsanweisungen mit Sicherheits- und Warnhinweisen erklären die korrekte Anwendung des SEGUFIX®-Systems. Die SEGUFIX®-Produkte sind mit Pflegeanleitungen und CE-Kennzeichnung versehen. Die farbigen Etiketten nach dem Ampel-System bieten schnelle und zuverlässige Orientierung bei der Verwendung der Produkte.

- **SEGUFIX®-Gurte sind schwer entflammbar**

SEGUFIX®-Gurte sind schwer entflammbar. Sie erfüllen die strengen Normen der Automobilindustrie entsprechend der DIN 75200 „Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kfz-Innenraumausstattung“ sowie DIN EN 71-2 Abschnitt 4.3 „Sicherheit von Spielwaren-Entflammbarkeit“.

- **Produktinnovationen – Sonderanfertigungen**

SEGUFIX® unterhält eine Entwicklungsabteilung. In Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Reha-Zentren und anderen Einrichtungen wurden im Laufe der Jahre Problemlösungen entwickelt, die zur Entstehung von neuen und praktischen Produkten für die Krankenpflege führten, die heute aus der Praxis nicht mehr wegzudenken sind. Komplizierte und einfache Sonderanfertigungen werden von uns auf Wunsch individuell erarbeitet und hergestellt.

- **Kompetente Beratung**

Unser geschultes Personal berät Sie gern in allen produktbezogenen Fragen.

- **Fortbildungen – Fachmessen**

SEGUFIX® unterstützt Fortbildungen für Fachpersonal aus allen Einrichtungen mit Teilnahmezertifikat. Auf der Fachmesse MEDICA bieten wir Informationen über Produktneuheiten und individuelle Beratung.

- **Stabile Preise**

Innovationen und rationeller werdende Produktionsverfahren halten unsere Preise seit Jahrzehnten stabil. Die Vorteile dieser Produktionspolitik kommen stets unseren Kunden zugute.

- **Schnelle und zuverlässige Lieferzeiten**

Alle SEGUFIX®-Produkte sind sofort lieferbar oder können nach Bedarf kurzfristig hergestellt werden.

- **SEGUFIX® online**

Produktinformationen sind abrufbar unter: [www.segufix.com](http://www.segufix.com)  
Online bestellen unter: [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

- **SEGUFIX®-Bandagengurte** (naturweiß)

bestehen aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch und sind bis zu 95 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Die Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8 % Schrumpfung möglich. Gurte immer trocken lagern.

Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.

Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.

Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich

(Ziffer 3.1.2 „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren“). Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.

- **SEGUFIX®-Transportgurte** (farbig/schwarz)

bestehen aus Polyester und sind bis zu 30 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes.

Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern.

Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.

Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.

- **SEGUFIX®-Schlösser und Sockel**

vor der Wäsche entfernen. Schlösser und Sockel mit einem feuchten Tuch reinigen/desinfizieren, keinesfalls in Flüssigkeit tauchen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht oder nicht mehr zuverlässig.

- **Klettverschlüsse**

sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, um den Klettverschluss flusenfrei zu halten. Klettverschlüsse nach Bedarf mit einer harten Bürste von Flusen und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch die Haltekraft überprüfen.

- **Haltbarkeitsdauer**

hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungsverfahren (Reinigungsmittel/Wäschenetz) verlängert.

- **SEGUFIX®-Schaffelle**

Waschmaschine: Waschtemperatur 30 - 40 °C, nicht schleudern, Wollwaschmittel verwenden.

Handwäsche: in handwarmem Wasser bei 30 - 40 °C mit Wollwaschmittel zügig durchwaschen, in klarem, handwarmem Wasser durchspülen und ausschleudern.

Hinweis: Bitte unbedingt beachten, dass das Fell nicht zu lange im Wasser ist (nicht einweichen).

Trocknen der Schaffelle: zum Trocknen in den Wäschetrockner oder einfach an einer luftigen Stelle aufhängen.

Vorsicht: Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!

Bevor das Fell vollständig trocken ist, dieses etwas in Form ziehen und wenn nötig mit einer Stahlbürste leicht durchbürsten.



### Wäschenetz:

Das SEGUFIX®-Wäschenetz schützt das Gurtmaterial beim Waschvorgang.

Produktinformationen siehe Seite 27 und 47



### Sonderanfertigungen:

Als Entwickler und Erfinder des SEGUFIX®-Systems fertigen wir gerne von den Standardmaßen abweichende Produkte nach Ihren Vorgaben an.



## SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz / segufix.com

Art. 1206

zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1216

10er-Pack  
SEGUFIX®-Magnetschloss  
schwarz / segufix.com



## SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot

Art. 1208

zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-  
Magnetschlusses schwarz / segufix.com

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1218

10er-Pack  
SEGUFIX®-Magnetschlüssel  
rot



## SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot mit Anhänger

Art. 1209

zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-  
Magnetschlusses schwarz / segufix.com

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1219

10er-Pack  
SEGUFIX®-Magnetschlüssel  
rot mit Anhänger



## SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz / segufix.com

Art. 1204

ohne SEGUFIX®-Metallsockel

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1214

10er-Pack  
SEGUFIX®-Magnetknopf  
schwarz / segufix.com



## SEGUFIX®-Metallsockel

Art. 1205

für SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz /  
segufix.com

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1215

10er-Pack  
SEGUFIX®-Metallsockel



### SEGUFIX®-Dreh-Patentschloss grün

Art. 1306

zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme  
(für Bandagen ab Herstellungsquartal II/2003)

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1316

10er-Pack  
SEGUFIX®-Dreh-Patentschloss  
grün



### SEGUFIX®-Dreh-Patentschlüssel gelb

Art. 1308

zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Dreh-  
Patentschlusses grün

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1318

10er-Pack  
SEGUFIX®-Dreh-Patent-  
schlüssel gelb



### SEGUFIX®-Dreh-Patentknopf grün

Art. 1304

ohne SEGUFIX®-Vierkantsockel

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1314

10er-Pack  
SEGUFIX®-Dreh-Patentknopf  
grün



### SEGUFIX®-Vierkantsockel

Art. 1305

für SEGUFIX®-Dreh-Patentknopf grün

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1315

10er-Pack  
SEGUFIX®-Vierkantsockel

#### SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz



- hohe Belastbarkeit
- Standard Magnet-schlüssel
- Sicherheitsverschluss auf Magnetbasis (Spezialmechanismus)
- sicher und schnell für das Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

#### SEGUFIX®-Dreh-Patentschloss-System grün



- erhöhte Belastbarkeit und Verschluss-Sicherheit
- codierter Magnetschlüssel
- Sicherheitsverschluss auf Magnetbasis (Spezialmechanismus)
- sicher und schnell für das Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

#### Steckschloss-System



- hohe Belastbarkeit
- Sicherheitsverschluss für alle Anwendungen, bei denen auf Magnete verzichtet werden muss
- sicher und schnell für das Verschließen der SEGUFIX®-Systeme



## Steckschloss

**Art. 1406**

- zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme
- ohne Magnetmechanismus
- kann in unmittelbarer Nähe zum Herzschrittmacher verwendet werden

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



**Art. 1416**

10er-Pack  
Steckschloss



## Steckschlüssel

**Art. 1408**

zum Öffnen des Steckschlusses

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



**Art. 1418**

10er-Pack  
Steckschlüssel



## Steckknopf

**Art. 1404**

ohne Stecksockel

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



**Art. 1414**

10er-Pack  
Steckknopf



## Stecksockel

**Art. 1405**

für Steckknopf

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



**Art. 1415**

10er-Pack  
Stecksockel

## Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen

### Grundauführung → Befestigungsgurt: mittlere Länge

- Spannweite\* der Befestigungsgurte am Bett:  
mit Schloss-System (mit Ösen): ca. 1200 - 1450 mm  
bei Klettprodukten (ohne Ösen): ca. 950 - 1540 mm

Beispiel Artikelnummer: 2221 - M (Größe M)



Bandagen-System  
Art. 2203 - 2905

### Ausführung b → Befestigungsgurt: kurz

- Spannweite\* der Befestigungsgurte am Bett:  
mit Schloss-System (mit Ösen): ca. 1000 - 1200 mm  
bei Klettprodukten (ohne Ösen): ca. 920 - 1330 mm
- die Gesamtlänge der Befestigungsgurte ist auf jeder Seite ca. 130 mm kürzer als die Grundauführung

Beispiel Artikelnummer: 2221/b - M (Größe M)



Zusatz-Gurte  
Art. 3110/r - 3745

**\*Spannweite der Befestigungsgurte:**  
Das Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett.

### Ausführung e → Befestigungsgurt: lang

- Spannweite\* der Befestigungsgurte am Bett:  
mit Schloss-System (mit Ösen): ca. 1450 - 1700 mm  
bei Klettprodukten (ohne Ösen): ca. 950 - 1800 mm
- die Gesamtlänge der Befestigungsgurte ist auf jeder Seite ca. 200 mm länger als die Grundauführung

Beispiel Artikelnummer: 2221/e - M (Größe M)



Akut-System  
Art. 4212/r - 4415/r

### Ausführung f → Flausch

- für sensible Haut
- mit 100 % reiner Baumwolle

Beispiel Artikelnummer: 2221/f - M (Größe M)



Mobile-Fixierung  
Art. 5204/r - 5745

### Ausführung r → robust

- verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Beispiel Artikelnummer: 2221/r - M (Größe M)



Transport-System  
Art. 6040 - 6760

#### Hinweis Klettprodukte:

Keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Sitzgurt-System  
Art. 7240 - 7780

Zubehör / Schauffelle  
Art. 8010 - 8029



## SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt

Art. 2221 / Art. 2321 / Art. 2421

### Verwendungszweck:

- Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt und integrierten Seitenbefestigungen
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L / XL / XXL\*\*  
(ab Gr. XL nur in Version r, \*\*Größe XXL auf Anfrage)

**Versionen:** Grundausführung / b / e / f / r

**Einzelteil:** Art. 2121 (ohne Schloss und Schlüssel)

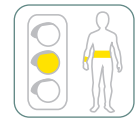

HMV: 19.40.02.5017  
PHMV: 50.45.02.5017

## SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2221

Standard mit Schrittgurt und Magnetschloss-System schwarz



Art. 2321

Standard mit Schrittgurt und Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 2421

Standard mit Schrittgurt und Steckschloss-System



Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung			
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite* (mit Ösen)	Spannweite* Klettprodukte (ohne Ösen)
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm	950 - 1540 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm	920 - 1330 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm	950 - 1800 mm
... /f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle		–
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung		–

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Größentabelle			
Größe	Umfang Taille	Bauchgurt ①	Bettgurt ②
S	520 - 820 mm	140 mm	180 mm
M	800 - 1200 mm	180 mm	180 mm
L	1160 - 1560 mm	180 mm	180 mm
XL	1360 - 1800 mm	180 mm	180 mm
XXL*	1560 - 1980 mm	180 mm	180 mm

\*\*Größe XXL auf Anfrage

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt

Art. 2721

### Verwendungszweck:


- Lagerungshilfe auf dem Bett
- gibt unsicheren Patienten Halt
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt und integrierten Seitenbefestigungen (mit Schlaufenverschluss)

**Größen:** S / M / L

**Versionen:** Grundausführung / b / e

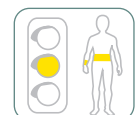





## SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt

Art. 2222 / Art. 2322 / Art. 2422

### Verwendungszweck:

- 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (Seite 16)
- 1 SEGUFIX®-Schulterhalterung (Seite 20)
- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten (Seite 21)
- 2 SEGUFIX®-Fußmanschetten (Seite 22)
- 1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt (Seite 22)

- 11 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L / XL  
(ab Gr. XL nur in Version r)

**Versionen:** Grundauführung / b / e / r

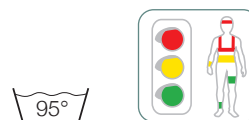

## SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2222



Komplett mit Schrittgurt und Magnetschloss-System schwarz

Art. 2322



Komplett mit Schrittgurt und Dreh-Patentschloss-System grün

Art. 2422



Komplett mit Schrittgurt und Steckschloss-System

Größentabelle			
Größe	Umfang Taille	Umfang Handgelenk	Umfang Fußgelenk
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm	170 - 250 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm	220 - 300 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm	270 - 330 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm	300 - 380 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung	

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett



## Anwendungsbeispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz




SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (Art. 2221) und SEGUFIX®-Schulterhalterung (Art. 2203)



SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt (Art. 2222), SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Art. 2211), SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung (Art. 2212)



SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (Art. 2221) und SEGUFIX®-Schaffell-Einlage (Art. 8012)

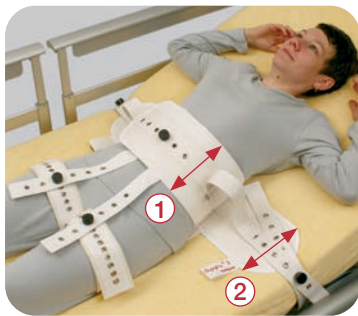

## SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten

Art. 2231 / Art. 2331 / Art. 2431

### Verwendungszweck:

- Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten und integrierten Seitenbefestigungen
- 5 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

**Versionen:** Grundauführung / b / e / f / r

**Einzelteil:** Art. 2131 (ohne Schloss und Schlüssel)

HMV: 19.40.02.5018  
PHMV: 50.45.02.5018



## SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

### Art. 2231

Standard mit Oberschenkelmanschetten und Magnetschloss-System schwarz



### Art. 2331

Standard mit Oberschenkelmanschetten und Dreh-Patentschloss-System grün



### Art. 2431

Standard mit Oberschenkelmanschetten und Steckschloss-System



Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung			
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite* (mit Ösen)	Spannweite* Klettprodukte (ohne Ösen)
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm	950 - 1540 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm	920 - 1330 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm	950 - 1800 mm
... /f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle		-
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung		-

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Größentabelle				
Größe	Umfang Taille mm	Umfang Oberschenkel mm	1 Bauchgurt mm	2 Bettgurt mm
S	520 - 820	380 - 520	140	180
M	800 - 1200	500 - 720	180	180
L	1160 - 1560	580 - 880	180	180
XL	1360 - 1800	850 - 1150	180	180

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Standard Klett mit Oberschenkelmanschetten

Art. 2731

### Verwendungszweck:

- Lagerungshilfe auf dem Bett
- gibt unsicheren Patienten Halt
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard Klett mit Oberschenkelmanschetten und integrierten Seitenbefestigungen (mit Schlaufenverschluss)

**Größen:** S / M / L

**Versionen:** Grundauführung / b / e





## SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten

Art. 2232 / Art. 2332 / Art. 2432

### Verwendungszweck:

- 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Seite 18)
- 1 SEGUFIX®-Schulterhalterung (Seite 20)
- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten (Seite 21)
- 2 SEGUFIX®-Fußmanschetten (Seite 22)
- 1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt (Seite 22)
- 13 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L / XL  
(ab Gr. XL nur in Version r)

**Versionen:** Grundauführung / b / e / r



## SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2232**



Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Magnetschloss-System schwarz

**Art. 2332**



Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Dreh-Patentschloss-System grün

**Art. 2432**



Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Steckschloss-System

Größentabelle Umfänge				
Größe	Umfang Taille	Umfang Handgelenk	Umfang Fußgelenk	Umfang Oberschenkel
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm	170 - 250 mm	380 - 520 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm	220 - 300 mm	500 - 720 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm	270 - 330 mm	580 - 880 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm	300 - 380 mm	850 - 1150 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung	

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett



## Anwendungsbeispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz



SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Art. 2231)



SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Art. 2231) und SEGUFIX®-Schulterhalterung (Art. 2203)




## SEGUFIX®-Schulterhalterung

Art. 2203 / Art. 2303 / Art. 2403

### Verwendungszweck:

- verhindert das Herauswinden nach oben
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

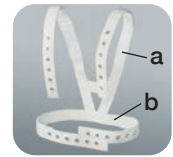

### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt/Oberschenkelmanschetten (mit Schloss-System) erforderlich

Größe	Gurt a	Gurt b
XS	600 mm	770 mm
S	860 mm	1190 mm
M	1010 mm	1450 mm
L	1170 mm	1650 mm
XL	1420 mm	1870 mm


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Schulterhalterung
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

**Größen:** XS / S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

**Versionen:** Grundauführung / r

**Einzelteil:** Art. 2103  
(ohne Schloss und Schlüssel)

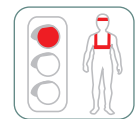

Größe XS / S



Größe M / L / XL

HMV: 19.40.02.5005

PHMV: 50.45.02.5005

## SEGUFIX®-Schulterhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2203**

Schulterhalterung mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 2303**

Schulterhalterung mit Dreh-Patentschloss-System grün




**Art. 2403**

Schulterhalterung mit Steckschloss-System



Ausführungen: siehe Tabelle Seite 21

Tabelle: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

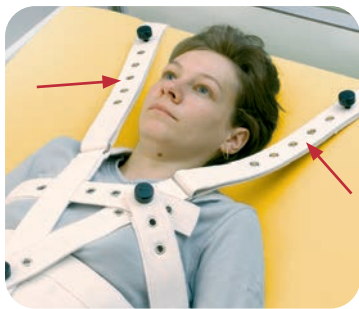

## SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung

Art. 2212 / Art. 2312 / Art. 2412

### Verwendungszweck:

- verhindert das Aufrichten des Oberkörpers auf dem Bett (auf ständige Beobachtung ist zu achten)
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt/Oberschenkelmanschetten (mit Schloss-System) erforderlich
- SEGUFIX®-Schulterhalterung erforderlich


Gesamtlänge: ca. 1140 mm (je Gurt)

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

**Versionen:** Grundauführung / r

**Einzelteil:** Art. 2112 (2 Gurte)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

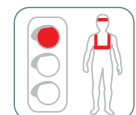

### Geeignet für SEGUFIX®-

- Schulterhalterung (nicht für Größe XS)
- Akut-Fixierung-Schulter
- Kompakt

HMV: 19.40.02.5006

PHMV: 50.45.02.5006

## SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2212**

Schulter-Zusatzhalterung mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 2312**

Schulter-Zusatzhalterung mit Dreh-Patentschloss-System grün



**Art. 2412**

Schulter-Zusatzhalterung mit Steckschloss-System





Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

HMV: 19.40.02.5007  
PHMV: 50.45.02.5007

## SEGUFIX®-Handhalterung

Art. 2204 / Art. 2304 / Art. 2404

### Verwendungszweck:

- flexible Fixierung einer oder beider Hände auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten erforderlich


### Bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

**Größen:** S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

**Versionen:** Grundausführung / r

**Einzelteil:** Art. 2104 (für eine Hand)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

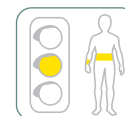

## SEGUFIX®-Handhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2204**

Handhalterung  
mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 2304**

Handhalterung  
mit Dreh-Patentschloss-System grün



**Art. 2404**

Handhalterung  
mit Steckschloss-System



Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

### Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmale
...	Grundausführung
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung



Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

HMV: 19.40.02.5008  
PHMV: 50.45.02.5008

## SEGUFIX®-Handhalterung verlängert

Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

### Verwendungszweck:

- flexible Fixierung einer oder beider Hände auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten nicht erforderlich


### Bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten verlängert
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

**Versionen:** Grundausführung / r

**Einzelteil:** Art. 2124 (für eine Hand)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

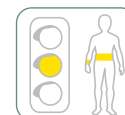

## SEGUFIX®-Handhalterung verlängert – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2224**

Handhalterung verlängert  
mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 2324**

Handhalterung verlängert  
mit Dreh-Patentschloss-System grün



**Art. 2424**

Handhalterung verlängert  
mit Steckschloss-System





## SEGUFIX®-Fußhalterung

Art. 2205 / Art. 2305 / Art. 2405

### Verwendungszweck:

- lockere bis feste Fixierung eines oder beider Füße auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Fußmanschetten
- 1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt
- 4 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

**Größen:** S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)


**Versionen:** Grundauführung / b / e / r

**Einzelteile:** Art. 2105 (für einen Fuß)  
Art. 2005 (Verbindungsgurt)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm
XL	300 - 380 mm

HMV: 19.40.02.5009

PHMV: 50.45.02.5009

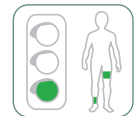

### SEGUFIX®-Fußhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2205**

Fußhalterung mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 2305**

Fußhalterung mit Dreh-Patentschloss-System grün



**Art. 2405**

Fußhalterung mit Steckschloss-System



### Hinweis:

Zusätzliche Bewegungseinschränkung durch SEGUFIX®-Beinbügelgurt möglich (siehe Seite 27)

### Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung	

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung

Art. 2211 / Art. 2311 / Art. 2411

### Verwendungszweck:

- zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine auf dem Bett
- auch als Ergänzung der 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (für beide Beine)
- 4 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

**Größen:** S / M / L


**Versionen:** Grundauführung / b / e / r

**Einzelteil:** Art. 2111 (für beide Beine)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

Umfang Oberschenkel	
S	200 - 360 mm
M	340 - 580 mm
L	580 - 750 mm

HMV: 19.40.02.5010

PHMV: 50.45.02.5010

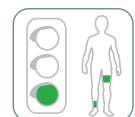

### SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 2211**

Oberschenkelhalterung mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 2311**

Oberschenkelhalterung mit Dreh-Patentschloss-System grün



**Art. 2411**

Oberschenkelhalterung mit Steckschloss-System



## Produkte mit Klettverschluss



### Umfang Handgelenk

M	160 - 240 mm
---	--------------

### SEGUFIX®-Handhalterung Klett verlängert

Art. 2724

#### Verwendungszweck:

- Positionierung einer oder beider Hände auf dem Bett
- auch für den Gebrauch an Tragen und Liegen geeignet
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.


SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten nicht erforderlich

#### Bestehend aus:

2 SEGUFIX®-Handmanschetten Klett verlängert  
(mit Schlaufenverschluss)

Größe: M

Einzelteil: Art. 2824 (für eine Hand)

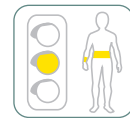

### Umfang Fußgelenk

S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm

### SEGUFIX®-Fußhalterung Klett

Art. 2705

#### Verwendungszweck:

- lockere bis feste Lagerung eines oder beider Füße auf dem Bett
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.


#### Bestehend aus:

2 SEGUFIX®-Fußmanschetten Klett (mit Schlaufenverschluss)  
1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt (mit Schlaufenverschluss)

Größen: S / M

Versionen: Grundauführung / b / e

Einzelteile: Art. 2805 (für einen Fuß)  
Art. 2905 (Verbindungsgurt)

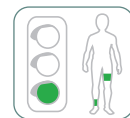

### Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	950 - 1540 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	920 - 1330 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	950 - 1800 mm

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

#### Hinweis:

SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten siehe Seite 16 und 18



### Umfang Oberschenkel

S	200 - 360 mm
M	340 - 580 mm
L	580 - 750 mm

### SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung Klett

Art. 2711

#### Verwendungszweck:


- zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine auf dem Bett
- auch als Ergänzung der 5-Punkt-Fixierung
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

#### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung Klett (für beide Beine)  
(mit Schlaufenverschluss)

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / b / e

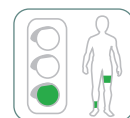



## SEGUFIX®-Kopflagerung

Art. 2217 / Art. 2317 / Art. 2417

### Verwendungszweck:

- zur Positionierung und Lagerung des Kopfes auf dem Bett (auf ständige Beobachtung ist zu achten)
- 5-Punkt-Fixierung erforderlich (siehe Hinweis unten)
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Maße		
Stirngurt	Umfang	480 - 800 mm
Kinn-gurt	Umfang	700 - 800 mm
Lagerungs-gurt	Länge	1200 mm


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Bettgurt mit Stirngurt
- 1 SEGUFIX®-Kinn-gurt
- 1 SEGUFIX®-Lagerungsgurt
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Versionen: Grundauführung / b / e

### Einzelteil: Art. 2117

- 1 SEGUFIX®-Bettgurt mit Stirngurt
- 1 SEGUFIX®-Kinn-gurt
- 1 SEGUFIX®-Lagerungsgurt  
(ohne Schloss und Schlüssel)

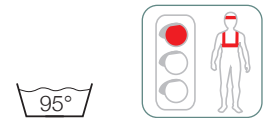

## SEGUFIX®-Kopflagerung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2217

Kopflagerung mit Magnetschluss-System schwarz



Art. 2317

Kopflagerung mit Dreh-Patentschluss-System grün



Art. 2417

Kopflagerung mit Steckschluss-System



### Wichtiger Hinweis:

- Die SEGUFIX®-Kopflagerung ist kein Mittel zur Patientenfixierung, sondern eine Lagerungshilfe.
- Die SEGUFIX®-Kopflagerung dient der Lagerung des Kopfes in einer bestimmten Position.
- Um Verletzungen im Bereich von Wirbelsäule, Hals und Nacken vorzubeugen, darf die Kopflagerung nur in Verbindung mit einer 5-Punkt-Fixierung angewendet werden (z. B. SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten, -Handhalterung und -Fußhalterung).
- Bei Verwendung der SEGUFIX®-Kopflagerung ist eine ständige Überwachung erforderlich, insbesondere weil willkürliche oder absichtliche Bewegungen zu Verletzungen im Bereich des Nackens oder der Wirbelsäule führen können.

### Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett  
Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich  
(Gurte sind nicht vorgewaschen)





## SEGUFIX®-Kompakt

Art. 2250/r / Art. 2350/r / Art. 2450/r

### Verwendungszweck:

- zur Fixierung von Patienten auf dem Bett
- verhindert ein Entkommen nach oben und unten bei voller Bewegungsfreiheit der Gliedmaßen
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Kompakt
- 7 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 2150/r  
(ohne Schloss und Schlüssel)

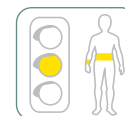

HMV: 19.40.02.5014  
PHMV: 50.45.02.5014

## SEGUFIX®-Kompakt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2250/r



Kompakt  
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2350/r



Kompakt  
mit Dreh-Patentschloss-System grün


Art. 2450/r



Kompakt  
mit Steckschloss-System

Größentabelle				
Größe	Diagonaler Rumpf mm	Umfang Brust mm	Umfang Taille mm	Umfang Oberschenkel mm
S	1340 - 1540	480 - 880	520 - 820	380 - 520
M	1640 - 1740	750 - 1150	800 - 1200	500 - 720
L	1940 - 2040	1030 - 1430	1160 - 1560	580 - 880

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich  
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

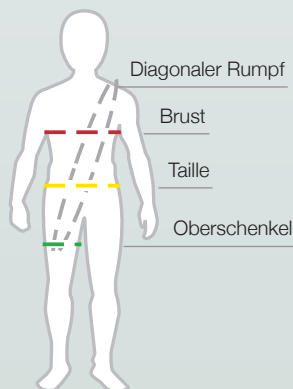

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
... /r	verstärkt, Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /rb	verstärkt, Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /re	verstärkt, Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm


\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett  
Ausführung r: verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung



Beispiel mit SEGUFIX®-  
Magnetschloss-System schwarz

### Produkteigenschaften:

- volle Bewegungsfreiheit für Arme und Beine
- keine Druckstellen im Genitalbereich durch Oberschenkelmanschetten
- komfortable Polsterung
- schnelles Öffnen in Notsituationen – nur 5 Schlösser
- voll kompatibel mit weiteren Produkten des SEGUFIX®-Systems

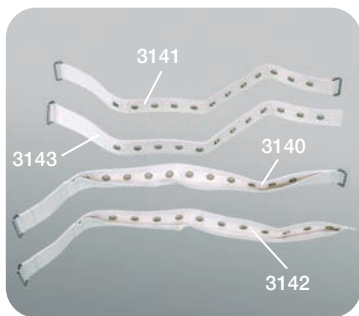

Art. 3140 - 3143 (Einzelteile)

## SEGUFIX®-Verlängerungsgurt

Art. 3240 - Art. 3444

### Verwendungszweck:

- verlängert Befestigungsgurte für die Anbringung an breiten Betten oder Rückenlehnen
- nicht geeignet für die Veränderung von Größen (z. B. Bauchgurt)

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel



Art. 3144 (Einzelteil)

Versionen: Grundauführung / r

Einzelteile: Art. 3140, 3141, 3142, 3143, 3144 (ohne Schloss und Schlüssel)

HMV: 19.99.99.0002

PHMV: 50.99.99.0002



## SEGUFIX®-Verlängerungsgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 3240 / 3241 / 3242  
3243 / 3244



Verlängerungsgurt mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 3340 / 3341 / 3342  
3343 / 3344



Verlängerungsgurt mit Dreh-Patentschloss-System grün

Art. 3440 / 3441 / 3442  
3443 / 3444



Verlängerungsgurt mit Steckschloss-System

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale
...	Grundauführung
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Verlängerungsgurt	3240 3340 3440 3140	3241 3341 3441 3141	3242 3342 3442 3142	3243 3343 3443 3143	3244 3344 3444 3144
Gesamtlänge	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1200 mm
Metallschlaufen	2	2	1	1	0
12 Ösen	X	X	X	X	-
26 Ösen	-	-	-	-	X
Sockeltasche	X	-	X	-	-

ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss

Art. 3745

### Verwendungszweck:

- verlängert Befestigungsgurte von SEGUFIX®-Sitzgurten mit Schnappverschluss
- geeignet für Produkte mit Schnappverschluss
- für die Anbringung an breiteren Rückenlehnen

### Geeignet für:


- SEGUFIX®-Sitzgurt Klett (Seite 41)
- SEGUFIX®-Sitzgurt (Seite 40)
- SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (Seite 42)
- SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten (Seite 43)

Gesamtlänge: ca. 800 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss



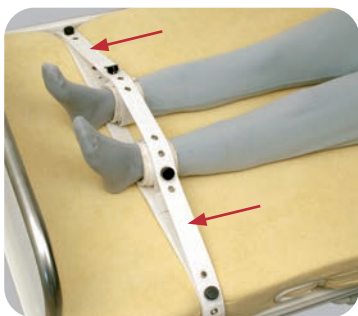

## SEGUFIX®-Beinbügelgurt

Art. 3110/r

### Verwendungszweck:

- zur zusätzlichen Bewegungseinschränkung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Geeignet für:

- SEGUFIX®-Fußhalterung (Seite 22)
- SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Seite 22)
- SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (Seite 29)

Gesamtlänge: ca. 1240 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Beinbügelgurt  
(ohne Schloss und Schlüssel)

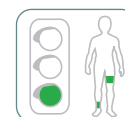

HMV: 19.99.99.0002

PHMV: 50.99.99.0002

### Ausführung – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmal
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich  
(Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Wäschenetz

Art. 8022

### Verwendungszweck:

- schützt das Gurtmaterial beim Waschvorgang

Größe: ca. 600 mm x 400 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Wäschenetz mit Kordelstopper



## SEGUFIX®-Lehrfilm

Art. 8018/D

### Verwendungszweck:

- zeigt die korrekte Anwendung der SEGUFIX®-Produkte
- für Schulungszwecke empfohlen

### Eigenschaften:

- Produktauswahl direkt aus dem Menü möglich
- Filmlänge insgesamt ca. 170 Minuten
- PAL Version

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Lehrfilm (auf DVD)



## SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter

Art. 4213/r / Art. 4313/r / Art. 4413/r

### Verwendungszweck:

- Fixierung von Patienten in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Voraussetzung für Anwendung:

- die SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter darf nur in Verbindung mit weiteren Fixierelementen benutzt werden, wobei Hände und Füße fixiert werden müssen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter
- 5 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 4113/r (ohne Schloss und Schlüssel)

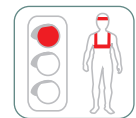

Umfang Brust	
S	430 - 740 mm
M	720 - 1200 mm
L	1130 - 1540 mm
XL	1470 - 1890 mm

### SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4213/r

Akut-Fixierung-Schulter mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 4313/r

Akut-Fixierung-Schulter mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 4413/r

Akut-Fixierung-Schulter mit Steckschloss-System



### Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
... /r	verstärkt, Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /rb	verstärkt, Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /re	verstärkt, Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Ausführung r: verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand

Art. 4214/r / Art. 4314/r / Art. 4414/r

### Verwendungszweck:

- Fixierung einer oder beider Hände in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand (für beide Hände)
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 4114/r (für beide Hände) (ohne Schloss und Schlüssel)

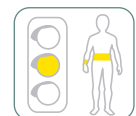

Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

### SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4214/r

Akut-Fixierung-Hand mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 4314/r

Akut-Fixierung-Hand mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 4414/r

Akut-Fixierung-Hand mit Steckschloss-System





Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm
XL	300 - 380 mm

## SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß

Art. 4215/r / Art. 4315/r / Art. 4415/r

### Verwendungszweck:

- Fixierung eines oder beider Füße in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (für beide Füße)
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 4115/r (für beide Füße)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

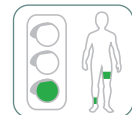

### SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4215/r

Akut-Fixierung-Fuß  
mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 4315/r

Akut-Fixierung-Fuß  
mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 4415/r

Akut-Fixierung-Fuß  
mit Steckschloss-System



## SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Komplett

Art. 4212/r / Art. 4312/r / Art. 4412/r

### Verwendungszweck:

- 5-Punkt-Fixierung von Patienten in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter
- 1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand (für beide Hände)
- 1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (für beide Füße)

- 13 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

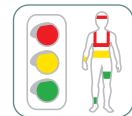

### SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Komplett – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4212/r

Akut-Fixierung-Komplett  
und Magnetschloss-System schwarz



Art. 4312/r

Akut-Fixierung-Komplett  
und Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 4412/r

Akut-Fixierung-Komplett  
und Steckschloss-System




### Das SEGUFIX®-Akut-System kann mit folgenden Produkten erweitert werden:



SEGUFIX®-  
Schulter-  
Zusatzhalterung  
(Art. 2212)  
Seite 20



SEGUFIX®-  
Oberschenkel-  
halterung  
(Art. 2211)  
Seite 22

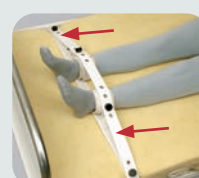

SEGUFIX®-  
Beinbügelgurt  
(Art. 3110/r)  
Seite 27

Beispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz



Umfang Brust	
S	430 - 740 mm
M	740 - 1140 mm
L	920 - 1320 mm

## SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter

Art. 5243 / Art. 5343 / Art. 5443

### Verwendungszweck:

- Fixierung von Patienten auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Handhalterung verlängert erforderlich
- SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß erforderlich

Tragenbreite: ca. 400 mm bis 800 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

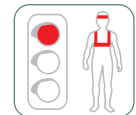

Größen: S / M / L

Einzelteil: Art. 5143 (ohne Schloss und Schlüssel)

## SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5243

Tragen-Fixierung-Schulter mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 5343

Tragen-Fixierung-Schulter mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 5443

Tragen-Fixierung-Schulter mit Steckschloss-System



## SEGUFIX® - Anwendungsbeispiel:



SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter (Art. 5243),  
Handhalterung Klett verlängert (Art. 2724),  
Tragen-Lagerung-Fuß Klett (Art. 5745)

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

## Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. Version	Produktmerkmale
...	Grundausführung
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung



Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm

## SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß

Art. 5245 / Art. 5345 / Art. 5445

### Verwendungszweck:

- Fixierung eines oder beider Füße auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


Tragenbreite: ca. 400 mm bis 800 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß (für beide Füße)
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Größe: S / M / L

Einzelteil: Art. 5145 (für beide Füße, ohne Schloss und Schlüssel)

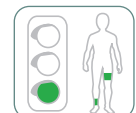

## SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5245

Tragen-Fixierung-Fuß mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 5345

Tragen-Fixierung-Fuß mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 5445

Tragen-Fixierung-Fuß mit Steckschloss-System





Umfang Fußgelenk	
M	220 - 300 mm

## SEGUFIX®-Tragen-Lagerung-Fuß Klett

Art. 5745

### Verwendungszweck:


- Positionierung eines oder beider Füße auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Tragenbreite: ca. 400 mm bis 800 mm

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Tragen-Lagerung-Fuß Klett (für beide Füße)  
(mit Schlaufenverschluss)

Größe: M

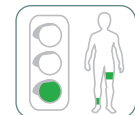

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

HMV: 19.40.02.5008

PHMV: 50.45.02.5008

## SEGUFIX®-Handhalterung verlängert

Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

### Verwendungszweck:

- flexible Fixierung einer oder beider Hände auf Tragen und Liegen
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen


### Bestehend aus:

2 SEGUFIX®-Handmanschetten verlängert  
4 SEGUFIX®-Schlösser  
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundauführung / r

Einzelteil: Art. 2124 (für eine Hand)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

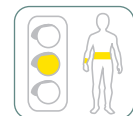

## SEGUFIX®-Handhalterung verlängert – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2224



Handhalterung verlängert  
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2324



Handhalterung verlängert  
mit Dreh-Patentschloss-System grün

Art. 2424



Handhalterung verlängert  
mit Steckschloss-System



Umfang Handgelenk	
M	160 - 240 mm

## SEGUFIX®-Handhalterung Klett verlängert

Art. 2724

### Verwendungszweck:


- Positionierung einer oder beider Hände auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Bestehend aus:

2 SEGUFIX®-Handmanschetten Klett verlängert  
(mit Schlaufenverschluss)

Größe: M

Einzelteil: Art. 2824 (für eine Hand)

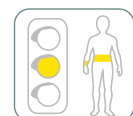



Festes Anbringen vor dem Bauch



Festes Anbringen hinter dem Rücken

## SEGUFIX®-Handfixiergürtel

Art. 5204/r / Art. 5304/r / Art. 5404/r

### Verwendungszweck:


- zur Fixierung der Hände beim Transport (auf ständige Beobachtung ist zu achten)
- verhindert Selbstverletzung oder Verletzung anderer durch den Patienten, z. B. begleitender Personen beim Transport
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Taillengürtel
- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Einzelteile: Art. 5101/r (Taillengürtel)  
Art. 5104/r (für eine Hand)  
(ohne Schloss und Schlüssel)

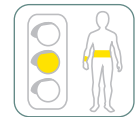

## SEGUFIX®-Handfixiergürtel – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5204/r

Handfixiergürtel mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 5304/r

Handfixiergürtel mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 5404/r

Handfixiergürtel mit Steckschloss-System



Lockerer Anbringen vor dem Bauch



Lockerer Anbringen hinter dem Rücken

Beispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

### Ausführung – Artikelnummer / Kennzeichnung

Art.-Nr. / Version	Produktmerkmal
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

### Größentabelle

Größe	Umfang Taille	Umfang Handgelenk
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm

Tabellen:  
ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



SEGUFIX®-Handfixiergürtel (Art. 5204/r)



SEGUFIX®-Handfixiergürtel (Art. 5204/r),  
Zusätzliche Verwendung des SEGUFIX®-Rückenlehngurt (Art. 6730) und Leibgurt-Transport (Art. 6216)

## SEGUFIX®-Anwendungsbeispiele

### Anwendung:

Verhindert Selbstverletzung oder Verletzung anderer durch den Patienten, z. B. begleitender Personen beim Transport.

### Achtung:

Das SEGUFIX®-Transport-System ersetzt nicht die für Kraftfahrzeuge gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsgurtspflicht und darf nur als zusätzliche Stützung von Patienten angebracht werden.





## SEGUFIX®-Fixierhilfe

Art. 5218 / Art. 5318 / Art. 5418

### Verwendungszweck:


- hilft bei der Fixierung auf Tragen und Liegen
- nach erfolgter Fixierung kann die SEGUFIX®-Fixierhilfe wieder entfernt werden
- zusätzliche Stabilisierung des Patienten
- kann auch über den Knien angebracht werden
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- Befestigung an der Trage mit Schloss-System
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen



### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Fixierhilfe
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

**Einzelteil:** Art. 5118  
(ohne Schloss und Schlüssel)

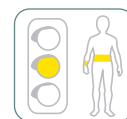

## SEGUFIX®-Fixierhilfe – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5218

Fixierhilfe  
mit Magnetschluss-System schwarz



Art. 5318

Fixierhilfe  
mit Dreh-Patentschluss-System grün



Art. 5418

Fixierhilfe  
mit Steckschluss-System



Größentabelle		
Gurtlängen	5218 / 5318 / 5418 / 5118	5718
Gesamtlänge	2050 mm	2450 mm
Länge breiter Gurt	590 mm	590 mm
Länge Befestigungsgurt (je Seite)	730 mm	930 mm
Spannweite* der Gurte (mit Patient)	920 - 1370 mm	700 - 1430 mm

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten inklusive Patient

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Fixierhilfe (mit Schlaufenverschluss)

Art. 5718


### Verwendungszweck:

- hilft bei der Fixierung auf Tragen und Liegen
- nach erfolgter Fixierung kann die SEGUFIX®-Fixierhilfe wieder entfernt werden
- zusätzliche Stabilisierung des Patienten
- kann auch über den Knien angebracht werden
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss
- keine Fixierung, da Schlaufenverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.



### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Fixierhilfe  
(mit Schlaufenverschluss)

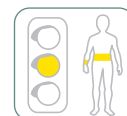



## SEGUFIX®-Leibgurt-Transport

Art. 6216 / Art. 6316 / Art. 6416

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen mit fester Rückenlehne, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Rückenlehnengurt erforderlich (Art. 6730, Seite 35)
- SEGUFIX®-Hosenträgergurt bei Bedarf (Art. 6720, Seite 35)

Gurtbreite: ca. 130 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Leibgurt-Transport, gepolstert
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Einzelteil: Art. 6116 (ohne Schloss und Schlüssel)



Umfang Taille*	
S	380 - 780 mm
M	700 - 1090 mm
L	1070 - 1480 mm

\*Sonderlängen auf Anfrage

HMV: 18.99.99.0906

## SEGUFIX®-Leibgurt-Transport – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6216

Leibgurt-Transport mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 6316

Leibgurt-Transport mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 6416

Leibgurt-Transport mit Steckschloss-System



Tabellen: ca. Maße



## SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett

Art. 6710

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen mit fester Rückenlehne, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Rückenlehnengurt erforderlich (Art. 6730, Seite 35)
- SEGUFIX®-Hosenträgergurt bei Bedarf (Art. 6720, Seite 35)
- der Klettverschluss muss mindestens 250 mm überlappen

Gurtbreite: ca. 130 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett, gepolstert

Größen: S / M / L



Umfang Taille*	
S	440 - 650 mm
M	650 - 920 mm
L	900 - 1300 mm

\*Sonderlängen auf Anfrage

HMV: 18.99.99.0906



### Achtung:

Das SEGUFIX®-Transport-System ersetzt nicht die für Kraftfahrzeuge gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte und darf nur als zusätzliche Stützung von Patienten angebracht werden.



SEGUFIX®-Leibgurt-Transport (Art. 6216) mit Magnetschloss-System schwarz und Rückenlehnengurt (Art. 6730)



SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett (Art. 6710) und Rückenlehnengurt (Art. 6730)



## SEGUFIX®-Hosenträgergurt

Art. 6720

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen mit fester Rückenlehne, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- unterstützt die aufrechte Sitzhaltung und verhindert das Abrutschen des Patienten
- keine Fixierung, da Schnappverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Voraussetzung für Anwendung:

- SEGUFIX®-Rückenlehnengurt erforderlich (siehe unten)
- SEGUFIX®-Leibgurt-Transport erforderlich (Seite 34)

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Hosenträgergurt  
(mit Schnappverschluss)

Größen: S / M



Umfang Rumpf	
S	890 - 1280 mm
M	1050 - 1950 mm

Patienten größer als 1400 mm benötigen Größe M

HMV: 18.99.99.0906

Tabellen: ca. Maße



## SEGUFIX®-Rückenlehnengurt

Art. 6730

### Verwendungszweck:

- wird zum Anbringen des SEGUFIX®-Leibgurtes-Transport und des SEGUFIX®-Hosenträgergurtes benötigt

### Voraussetzung für Anwendung:

- Rückenlehne muss stabil sein / feste Rückenlehne
- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich
- Befestigung an der Rückenlehne mit Klettverschluss
- der Klettverschluss muss mindestens 250 mm überlappen

Gurtbreite: ca. 180 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Rückenlehnengurt  
(mit Klettverschluss)

Größen: S / M / L / XL



Umfang Rückenlehne	
S	780 - 1030 mm
M	980 - 1230 mm
L	1180 - 1430 mm
XL	1420 - 1680 mm

HMV: 18.99.99.0906



## SEGUFIX® - Anwendungsbeispiel:



Beispiel mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

- SEGUFIX®-Hosenträgergurt (Art. 6720),
- Leibgurt-Transport (Art. 6216),
- Rückenlehnengurt (Art. 6730)



HMV: 18.99.99.0906

## SEGUFIX®-Rückhaltegurt

Art. 6240 / Art. 6340 / Art. 6440

### Verwendungszweck:

- zur Stützung des sitzenden Patienten in geeigneten Sitzgelegenheiten
- stützt den Oberkörper und verhindert gleichzeitig ein Abrutschen von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

### Voraussetzung für Anwendung:

- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt (ohne Schrittpolster, Art. 6040)
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel



Größen: S / M / L

Einzelteil: Art. 6140 (ohne Schloss und Schlüssel)

## SEGUFIX®-Rückhaltegurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6240

Rückhaltegurt mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 6340

Rückhaltegurt mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 6440

Rückhaltegurt mit Steckschloss-System



Größentabelle			
Größe	Umfang Leibgurt	Verbindungsstück	Schulterkranz
S	900 - 1300 mm	100 mm	800 mm
M	900 - 1300 mm	150 mm	800 mm
L	1220 - 1620 mm	150 mm	950 mm

Tabelle: ca. Maße

- a Gesamtumfang von Patient und Rückenlehne in Tailenhöhe
- b Verbindungsstück zwischen Leibgurt und Schulterkranz
- c Innerer Umfang des Schulterkranzes

Alle Maße werden beim sitzenden Patienten genommen.



HMV: 18.99.99.0906

## SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster

Art. 6244 / Art. 6344 / Art. 6444

### Verwendungszweck:

- zur Stützung des sitzenden Patienten in geeigneten Sitzgelegenheiten
- stützt den Oberkörper und verhindert gleichzeitig ein Abrutschen von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

### Voraussetzung für Anwendung:

- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt
- 1 SEGUFIX®-Schrittpolster
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

### Einzelteile:

- (ohne Schloss und Schlüssel)
- Art. 6040 (Schrittpolster)
- Art. 6140 (Rückhaltegurt)



Art. 6040



Größen: S / M / L

## SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6244

Rückhaltegurt m. Schrittpolster mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 6344

Rückhaltegurt m. Schrittpolster mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 6444

Rückhaltegurt m. Schrittpolster mit Steckschloss-System





## SEGUFIX®-Multigurt

Art. 6256 / Art. 6356 / Art. 6456

### Verwendungszweck:

- Haltegurt mit Klettverschluss und Ösen für ein Schloss
- als Sitzhilfe für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen (ohne Schloss)
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Multigurt
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: XS / S / M / L

Einzelteil: Art. 6156 (ohne Schloss und Schlüssel)



HMV: 18.99.99.0906

### SEGUFIX®-Multigurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6256



Multigurt  
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 6356



Multigurt  
mit Dreh-Patentschloss-System grün

Art. 6456



Multigurt  
mit Steckschloss-System

Größentabelle				
Größe	Gesamt-länge	Gurt-breite	Umfang* mit SEGUFIX®-Schloss	Umfang* mit Klettverschluss
XS	1600 mm	140 mm	1100 - 1500 mm	1000 - 1350 mm
S	1800 mm	140 mm	1300 - 1700 mm	1200 - 1550 mm
M	2000 mm	140 mm	1500 - 1900 mm	1350 - 1750 mm
L	2400 mm	140 mm	1900 - 2300 mm	1750 - 2150 mm

Tabelle: ca. Maße

\*Kompletter Umfang: Patient inklusive Rückenlehne / Patient inklusive Trage



SEGUFIX®-Schutzbezug  
Art. 8013  
(siehe Seite 38)



## SEGUFIX®-Multigurt Klett

Art. 6750

### Verwendungszweck:

- Haltegurt mit Klettverschluss
- als Sitzhilfe für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Voraussetzung für Anwendung:

- der Klettverschluss muss mindestens 250 mm überlappen

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Multigurt Klett

Größen: XS / S / M / L



HMV: 18.99.99.0906



## SEGUFIX®-Beckengurt

Art. 6266 / Art. 6366 / Art. 6466

### Verwendungszweck:

- Haltegurt mit Ösen für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Gurtbreite: ca. 130 mm

Spannweite\*: ca. 1170 mm - 1360 mm

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Beckengurt
- 2 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel



HMV:  
18.99.99.0906

**Einzelteil:** Art. 6166  
(ohne Schloss und Schlüssel)



## SEGUFIX®-Beckengurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 6266**

Beckengurt  
mit Magnetschluss-System schwarz



**Art. 6366**

Beckengurt  
mit Dreh-Patentschluss-System grün



**Art. 6466**

Beckengurt  
mit Steckschluss-System



\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten an Sitzgelegenheiten inklusive Patient



## SEGUFIX®-Schutzbezug

Art. 8013

### Verwendungszweck:

- schützt folgende SEGUFIX®-Transportgurte vor Verschmutzungen:
  - SEGUFIX®-Multigurt, Seite 37 (nur ohne Schlossanwendung)
  - SEGUFIX®-Beckengurt, Seite 38 - 39

### Eigenschaften:

- bis zu 95 °C waschbar, dampfsterilisierbar
- bakteriedicht

### Material:

- der Träger besteht zu 100 % aus Polyester
- die Beschichtung aus 100 % Polyurethan

Länge: ca. 790 mm / Breite: ca. 140 mm



### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Schutzbezug





## SEGUFIX®-Beckengurt mit Schnappverschluss

Art. 6760

### Verwendungszweck:

- Haltegurt mit Schnappverschluss für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- keine Fixierung, da Schnappverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Schnappverschluss bis max. 70 kg belastbar

Gurtbreite: ca. 130 mm  
Spannweite\*: ca. 740 mm - 1500 mm

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Beckengurt mit Schnappverschluss



HMV: 18.99.99.0906

\*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten an Sitzgelegenheiten inklusive Patient



### SEGUFIX® - Anwendungsbeispiel:



SEGUFIX®-Becken-  
gurt (Art. 6760)  
und  
Anti-Rutsch-Auflage  
(Art. 8017)  
Produktinformation  
siehe Seite 46

### Anti-Rutsch-Auflage

- vermeidet ein Abrutschen von der Sitzfläche
- eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Stühlen und Betten
- lässt sich leicht in Pfeilrichtung verschieben und vereinfacht damit die Positionierung des Patienten
- bis maximal 80 °C waschbar



## SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt

Art. 6276 / Art. 6376 / Art. 6476

### Verwendungszweck:

- Haltegurt mit Ösen für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

### Voraussetzung für Anwendung:

- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich

Gurtbreite: ca. 130 mm  
Gesamtumfang: ca. 1400 mm - 1800 mm (Patient und Sitzgelegenheit)

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt  
1 SEGUFIX®-Schloss  
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Einzelteil: Art. 6176 (ohne Schloss und Schlüssel)



HMV: 18.99.99.0906

### SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6276

Beckengurt mit Schrittgurt  
und Magnetschloss-System schwarz



Art. 6376

Beckengurt mit Schrittgurt  
und Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 6476

Beckengurt mit Schrittgurt  
und Steckschloss-System





## SEGUFIX®-Sitzgurt

Art. 7240 / Art. 7340 / Art. 7440 (hinten mit Schnappverschluss)

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar



### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt (hinten mit Schnappverschluss)
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / f

Einzelteil: Art. 7140 (ohne Schloss und Schlüssel)



HMV: 18.99.99.0906

### SEGUFIX®-Sitzgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7240

Sitzgurt mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 7340

Sitzgurt mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 7440

Sitzgurt mit Steckschloss-System



Ausführungen – Artikel-Nr. / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	Produktmerkmale
...	Grundauführung
... / f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle

Größentabelle				
Größe	Breite Bauchgurt	Umfang Taille des Patienten	Umfang Rückenlehne Schnappverschluss	Umfang Rückenlehne mit Schloss
S	140 mm	520 - 820 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
M	140 mm	800 - 1200 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
L	140 mm	1160 - 1560 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Sitzgurt

Art. 7246 / Art. 7346 / Art. 7446 (hinten mit einem Schloss)

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt (hinten mit Schloss)
- 2 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / f

Einzelteil: Art. 7146 (ohne Schloss und Schlüssel)



HMV: 18.99.99.0906

### SEGUFIX®-Sitzgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7246

Sitzgurt mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 7346

Sitzgurt mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 7446

Sitzgurt mit Steckschloss-System







HMV: 18.99.99.0906

### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt

Art. 7250 / Art. 7350 / Art. 7450 (hinten mit Schnappverschluss)

#### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

#### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (hinten mit Schnappverschluss)
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / f

Einzelteil: Art. 7150 (ohne Schloss und Schlüssel)



### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7250

Sitzgurt mit Schrittgurt mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 7350

Sitzgurt mit Schrittgurt mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 7450

Sitzgurt mit Schrittgurt mit Steckschloss-System



SEGUFIX®-Sitzgurte können mit SEGUFIX®-Verlängerungsgurten hinter der Rückenlehne verlängert werden. Verlängerungsgurt mit Ösen für Schloss-Systeme, Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss für Produkte mit Schnappverschluss.



Art. 3144 mit Ösen (Seite 26)



Art. 3745 mit Schnappverschluss (Seite 26)



HMV: 18.99.99.0906

### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt

Art. 7256 / Art. 7356 / Art. 7456 (hinten mit einem Schloss)

#### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

#### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (hinten mit Schloss)
- 2 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / f

Einzelteil: Art. 7156 (ohne Schloss und Schlüssel)



### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7256

Sitzgurt mit Schrittgurt mit Magnetschloss-System schwarz



Art. 7356

Sitzgurt mit Schrittgurt mit Dreh-Patentschloss-System grün



Art. 7456

Sitzgurt mit Schrittgurt mit Steckschloss-System





HMV: 18.99.99.0906

## SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten

Art. 7260 / Art. 7360 / Art. 7460 (hinten mit Schnappverschluss)

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten (hinten mit Schnappverschluss)
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / f

Einzelteil: Art. 7160

(ohne Schloss und Schlüssel)



### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7260



Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7360



Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Dreh-Patentschloss-System grün

Art. 7460



Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Steckschloss-System

Ausführungen – Artikel-Nr. / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	Produktmerkmale
...	Grundauführung
... / f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle

Größe	Umfang Oberschenkel
S	380 - 520 mm
M	500 - 720 mm
L	580 - 880 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



Produktabbildung



HMV: 18.99.99.0906

## SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten

Art. 7266 / Art. 7366 / Art. 7466 (hinten mit einem Schloss)

### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten (hinten mit Schloss)
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundauführung / f

Einzelteil: Art. 7166

(ohne Schloss und Schlüssel)



### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7266



Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7366



Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Dreh-Patentschloss-System grün

Art. 7466



Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Steckschloss-System

## Produkte mit Klettverschluss



### SEGUFIX®-Sitzgurt Klett

Art. 7740 (hinten mit Schnappverschluss)

#### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

#### Voraussetzung für Anwendung:

- der Klettverschluss am Bauchgurt muss mindestens 250 mm überlappen

#### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Sitzgurt Klett  
(hinten mit Schnappverschluss)

Größen: S / M / L



HMV: 18.99.99.0906

Größentabelle

Größe	Breite Bauchgurt	Umfang Taille des Patienten	Umfang Rückenlehne Schnappverschluss	Umfang Rückenlehne mit Schloss
S	140 mm	520 - 820 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
M	140 mm	800 - 1200 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
L	140 mm	1160 - 1560 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



Das SEGUFIX®-Sitzgurt-System kann mit folgenden Produkten erweitert werden:



SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett (Art. 7770)



SEGUFIX®-Fußhalterung Transport Klett (Art. 7780)



SEGUFIX®-Fußhalterung Transport (Art. 7280)

(Beispiel mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz)

Produktinformationen siehe Seite 44



### SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett

Art. 7750 (hinten mit Schnappverschluss)

#### Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

#### Voraussetzung für Anwendung:

- der Klettverschluss am Bauchgurt muss mindestens 250 mm überlappen

#### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett  
(hinten mit Schnappverschluss)

Größen: S / M / L



HMV: 18.99.99.0906



**Umfang Handgelenk**  
160 - 240 mm

## SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett

Art. 7770

### Verwendungszweck:

- zur Positionierung der Hände an Armlehnen von Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett (für eine Hand)



**Umfang Fußgelenk**  
220 - 300 mm

## SEGUFIX®-Fußhalterung Transport Klett

Art. 7780

### Verwendungszweck:

- zur Positionierung der Füße an Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:  
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Befestigung am Rollstuhl mit Schlaufenverschluss  
(Umfang: ca. 800 mm - 1000 mm)

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Fußhalterung Transport Klett (für beide Füße)



Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm

## SEGUFIX®-Fußhalterung Transport

Art. 7280 / Art. 7380 / Art. 7480

### Verwendungszweck:

- zur Positionierung der Füße an Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung am Rollstuhl mit einem Schloss  
(Umfang: ca. 680 mm - 1120 mm)

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Fußhalterung Transport (für beide Füße)  
3 SEGUFIX®-Schlösser  
1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L

**Einzelteil:** Art. 7180 (für beide Füße) (ohne Schloss und Schlüssel)



## SEGUFIX®-Fußhalterung Transport – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

**Art. 7280**

Fußhalterung Transport mit Magnetschloss-System schwarz



**Art. 7380**

Fußhalterung Transport mit Dreh-Patentschloss-System grün



**Art. 7480**

Fußhalterung Transport mit Steckschloss-System





## SEGUFIX®-Schaffell-Einlage für SEGUFIX®-Standard

Art. 8012

### Anwendung in Kombination mit:

- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, Abb. links (Seite 16)
- SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Seite 18)

### Eigenschaften:

- hautfreundlich
- temperaturnausgleichend zu jeder Jahreszeit
- schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit

Größe	Länge Einlage	Umfang Taille
S	960 mm	520 - 820 mm
M	1310 mm	800 - 1200 mm
L	1620 mm	1160 - 1560 mm

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Schaffell-Einlage für SEGUFIX®-Standard

**Größen:** S / M / L

(entsprechend der Größe der SEGUFIX®-Standard wählen)



Abb. mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

Tabelle: ca. Maße



## SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage

Art. 8010

### Eigenschaften:

- hautfreundlich
- temperaturnausgleichend zu jeder Jahreszeit
- schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit
- Größe: ca. 900 mm x 1800 mm

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage



## SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage

Art. 8011

### Eigenschaften:

- hautfreundlich
- temperaturnausgleichend zu jeder Jahreszeit
- schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit
- Größe: ca. 400 mm x 1000 mm

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage



### Wissenswertes über medizinische Schaffelle

Naturfelle sind hautfreundlich, da sie aus einer ähnlichen Grundsubstanz wie die menschliche Haut bestehen. Sie sind angenehm bei sensibler Haut.

Ärzte empfehlen Naturfelle besonders bei Wundliegen, Allergien, Nervenschmerzen, Nervosität, Kreislaufstörungen, Rheuma, Ischias, Rückenschmerzen und Gliederschmerzen.

### Weitere positive Eigenschaften von Naturfellen

- Sofortige Aufnahme von Transpirationsfeuchtigkeit und siebenmal schnellere Abgabe an die Luft als Synthetik. Körpergifte, die mit dem Schweiß ausgeschieden werden, werden abgebaut.
- Als Naturprodukte haben sie eine selbstreinigende Wirkung.
- Naturfell verfügt über „Eigenwärme“ und fühlt sich nie kalt an, die natürliche Atmung der Haut ist gewährleistet.
- Temperaturnausgleichend, daher für Sommer und Winter geeignet.
- Keine statische Aufladung.



**Bestehend aus:**  
1 SEGUFIX®-Transport-Tasche

## SEGUFIX®-Transport-Tasche

Art. 8014

### Verwendungszweck:

- bietet Platz für mehrere SEGUFIX®-Systeme zur Aufbewahrung auf den einzelnen Stationen
- schützt SEGUFIX®-Produkte
- praktisch für den Transport, z. B. zwischen Stationen, für Schulungszwecke

### Eigenschaften:

- separate Fächer an beiden Seiten
- Schulterriemen (abnehmbar) und Handgriffe
- Größe: ca. 620 mm x 320 mm x 280 mm
- Farbe: schwarz (weißer SEGUFIX®-Schriftzug)



**Bestehend aus:**  
1 SEGUFIX®-Bereitschaftstasche  
(ohne Inhalt)



## SEGUFIX®-Bereitschaftstasche

Art. 8015

### Verwendungszweck:

- griffbereit auf einen Blick für den schnellen Einsatz
- schützt SEGUFIX®-Produkte
- übersichtliche Aufbewahrung wichtiger SEGUFIX®-Produkte (z. B. ein SEGUFIX®-Transport-System, ein Akut-System usw.)
- platzsparende Lagerung, mehrere Taschen können übersichtlich gestapelt werden

### Eigenschaften:

- Fächer: für SEGUFIX®-Handbuch, zusätzliche Schlösser und Schlüssel usw.
- Schulterriemen (abnehmbar) und Handgriff
- Tasche gepolstert
- Größe: ca. 420 mm x 260 mm x 100 mm
- Farbe: rot / schwarz (weißer SEGUFIX®-Schriftzug)



**Bestehend aus:**  
1 Anti-Rutsch-Auflage

## Anti-Rutsch-Auflage

Art. 8017

### Verwendungszweck:

- verhindert, dass schwache Patienten vom Sitz rutschen
- eignet sich hervorragend für den Einsatz auf: Stühlen, Pflegestühlen, Rollstühlen, Betten, Bürostühlen usw.
- lässt sich leicht in Pfeilrichtung verschieben und vereinfacht damit die Positionierung des Patienten
- nicht für unruhige Patienten geeignet
- in feuchtem Zustand funktioniert die Anti-Rutsch-Auflage nicht

### Pflegehinweise:

- keinen Weichspüler oder Chlor verwenden
- kann nicht desinfiziert werden
- muss nach dem Waschen vollständig trocken sein, um die Funktion zu gewährleisten
- Trockner geeignet (niedrige Temperaturen)
- maximale Belastung: 150 kg
- Größe: ca. 370 mm x 430 mm

HMV: 22.29.01.2017





HMV: 19.40.02.3007  
PHMV: 50.45.02.3007

## SEGUFIX®-Aufrichter

Art. 8016

### Verwendungszweck:

- zur ergonomischen und wirbelsäulenschonenden Aufrichtung des Oberkörpers

Gesamtlänge: ca. 1600 mm

(bis zu 8 % Schrumpfung möglich, Gurte sind nicht vorgewaschen)

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Aufrichter



## SEGUFIX®-Lehrfilm

Art. 8018/D

### Verwendungszweck:


- zeigt die korrekte Anwendung der SEGUFIX®-Produkte
- für Schulungszwecke empfohlen

### Eigenschaften:

- Produktauswahl direkt aus dem Menü möglich
- Filmlänge insgesamt ca. 170 Minuten
- PAL Version

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Lehrfilm (auf DVD)

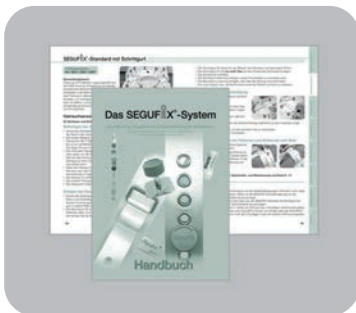

## SEGUFIX®-Handbuch

Art. 8019/D / Art. 8029/D

### Verwendungszweck:

- Gebrauchsanweisungen der SEGUFIX®-Produkte, jeder Handgriff wird anschaulich und ausführlich erklärt

### Eigenschaften:

- DIN A5 Format, schwarz-weiss Abbildungen
- Art. 8019/D: Handbuch gedruckt in Heftformat
- Art. 8029/D: Handbuch in digitaler Form (als PDF-Datei)

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Handbuch



## SEGUFIX®-Wäschenetz

Art. 8022

### Verwendungszweck:

- schont das Gurtmaterial beim Waschvorgang

Größe: ca. 600 mm x 400 mm

### Bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Wäschenetz mit Kordelstopper





**SEGUFIX®**

**Seit über 50 Jahren:**

**Kompetenz**

**Erfahrung**

**Qualität**

**Stabilität**

**Innovation**

Urheberrechtshinweis:

© SEGUFIX®-Bandagen, 2023

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck oder Verbreitung über elektronische Systeme/Datenträger/Internet – Bearbeitung ganz oder auszugsweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung.

Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:  
SEGUFIX®-Bandagen  
Das Humane System GmbH & Co. KG  
Allerbeeksring 33  
21266 Jesteburg, Deutschland

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen:  
[www.segufix.com/PDFs/AGBs/AGBs.pdf](http://www.segufix.com/PDFs/AGBs/AGBs.pdf)

Sonderanfertigungen und Produktschulungen auf Anfrage möglich.

Produktänderungen vorbehalten.

Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form, Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

SEGUFIX® ist eine registrierte Handelsmarke von SEGUFIX®-Bandagen, Das Humane System GmbH & Co. KG.

**SEGUFIX®-Bandagen**

Das Humane System GmbH & Co. KG  
Postfach 1142 · 21262 Jesteburg  
Allerbeeksring 33 · 21266 Jesteburg  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 4183 500-0  
Telefax: +49 (0) 4183 500-200  
E-Mail: [info@segufix.de](mailto:info@segufix.de)  
[www.segufix.com](http://www.segufix.com)  
[www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

Auflage 15 – 2023-02